

BONNES PRATIQUES D'UTILISATION **D'EQUIMETRE**




Consulter la vidéo tuto
installation ici.

Avant l'entraînement

- ✓ le capteur est **allumé** (LED blanche + verte fixes)
scanner la puce, sinon, pour lancer manuellement, cliquer 3 fois sur le bouton
- ✓ les électrodes sont **humidifiées**
- ✓ le capteur est **bien fixé** et ne bouge pas
- ✓ le câble **ne gêne pas** le pied du cavalier
le glisser sous la sangle


Après l'entraînement

- ✓ le capteur est **éteint** et **remis en charge**
charger votre capteur toute la nuit est recommandé
- ✓ le capteur est **nettoyé**
- ✓ la **synchronisation** des données est faite
être à côté du capteur éteint, branché ou avec de la batterie

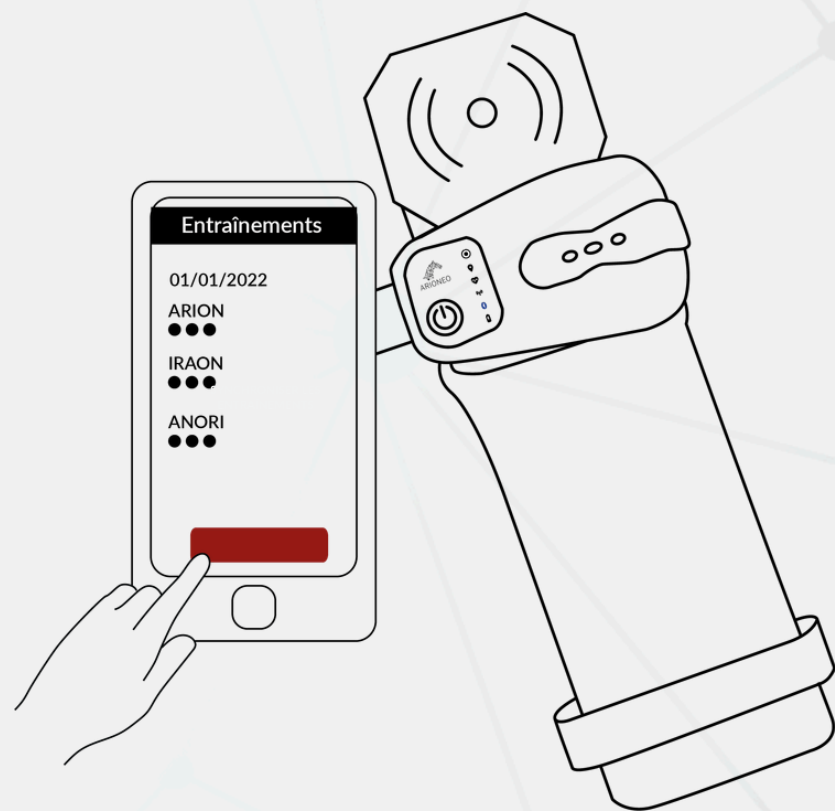

POINTS DE VIGILANCE

- **Ne pas immerger** le capteur dans l'eau
- **Ne pas tirer** sur le fil lorsque l'on retire l'électrode sous le tapis
- **Ne pas positionner** le capteur **trop haut** sur la sangle afin de ne pas gêner le pied du cavalier

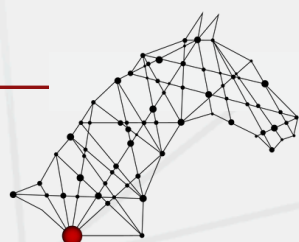

ARIONE